




ЛІНІЙКА ВИРОБІВ WARRIOR LITE | З КРОКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

1

ПІДКЛЮЧІТЬ ТРУБКУ ДО БЛОКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БВІ)

- Перевірте, що пакет БВІ не пошкоджений або його термін придатності не минув
- Зніміть кришки Люера
- Підключіть трубку до БВІ (вхід БВІ — це коротка трубка з ПВХ); не затягуйте занадто сильно
- Дозволено використання зовнішніх пристроїв для інфузії (до 360 мм рт .ст.)

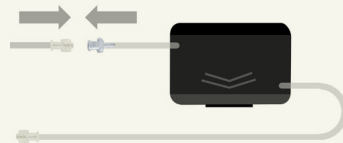


1

2

ЗАПОВНІТЬ ЯК ТРУБКИ, ТАК І БВІ

- Переконайтеся, що все повітря витіснене (об'єм заповнення — 19 мл)
- Можна заповнювати кров'ю або рідиною
- Розгляньте можливість використання пакета для натискання або ручної помпи для швидкого заповнення еритроцитами або ціліною кров'ю

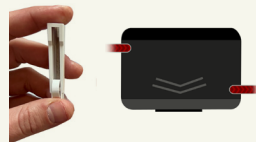


2

3

ПІДКЛЮЧІТЬ БВІ ДО БАЗОВОГО БЛОКА (або до подовжувача)

- Виступаючі стрілки БВІ повинні бути обернені до світлодіодної панелі
- Під час використання подовжувача вирівняйте виступаючі стрілки на БВІ та роз'ємі (тактильний напрямок).
- Система увімкнеться автоматично (або натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, розташовану на світлодіодній панелі)
- Дотримуйтесь системних вказівок на світлодіодній панелі

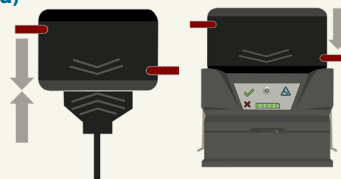

3

WARRIOR LITE

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПОВІДОМЛЕНЬ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

(примітка: **ЧЕРВОНИЙ** колір вказує на те, що дія обов'язкова)



Нагрівання до встановленої температури;
переконайтеся, що існує потік



Досягнуто заданої температури



Швидкість потоку перевищує ємність акумулятора.
Розгляньте можливість зменшення швидкості потоку



Низький заряд акумулятора. Акумулятор Extra Power
все ще має значний об'єм. Продовжуйте використання
пристрою. **Замініть акумулятор, коли його заряд
критично низький** (всі смуги блимають)

Немає потіку

БВІ не контролює потік; отже, він не може зупинити
потік. Якщо застосовується тільки гравітаційна подача,
може знадобитися 30-60 секунд, щоб запровадити
БВІ еритроцитами або цільною кров'ю. Розгляньте
можливість використання напірної або ручної помпи,
щоб прискорити процес.

Витік

Замініть БВІ; зменште зусилля, якщо працюєте з
ручними інфузійними пристроями; повідомте QinFlow.

Примітка. Цей **КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА** НЕ містить усіх вказівок, як в інструкції з використання. Тому, будь ласка, зверніться до інструкції з використання для отримання повних вказівок щодо експлуатації вашого пристрою Warrior!

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до всієї відповідної інформації (примітка: під час першого входу в систему може знадобитися авторизація) або зв'яжіться з нами за адресою info@qinflow.com



Потрібне усунення несправностей

1

Вимкніть пристрій (натисніть і потримайте кнопку ввімкнення/вимкнення), відрегулюйте ускладнення потоку, переконайтеся, що БВІ запровадлений, і повторно активуйте пристрій (натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення).

Якщо проблему не вирішено:

2

Вимкніть пристрій і замініть БВІ повністю запроваденим пристроєм. Блок має запускатися автоматично після підключення БВІ; якщо ні, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

Немає відображення

1

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення

Якщо проблему не вирішено:

2

Замініть акумулятор

Якщо проблему не вирішено:

3

Замініти БВІ



Не використовуйте пристрій, якщо дисплей пошкоджено

Не вдається вирішити проблему? Швидко вирішення більшості проблем полягає в тому, щоб виправити ускладнення потоку й замінити БВІ. Якщо проблему все ще не вирішено, навіть після перегляду інструкції з використання, напишіть нам на адресу info@qinflow.com або відкрийте запит на підтримку на нашому вебсайті (QinFlow.com >> Послуги та підтримка >> Відкрити запит на підтримку) on our website (QinFlow.com >> Services & Support >> Open Support Ticket)