




תקציר זה אינו תחליף לקריאת חוברת הוראות
 המשתמש של המוצר וביצוע אימון משתמש!
 טרוק את הברקוד על מנת להירשם לספריית
 המוצר ברשת או כתוב לנו ל-info@qinflow.com



טרוק ברקוד כדי לצפות בסרטון
 הדרכה בעברית (כעשר דקות)

וריר/אקסטרים: 3 שלבי תפעול

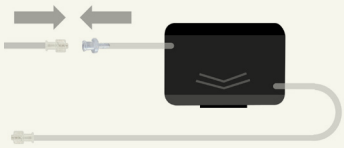

1

חבר את היחידה המתכלה לצנרת האינפוזיה

- וודא שהשקית הסטרילית של היחידה המתכלה במצב תקין ושהיחידה המתכלה בתוקף
- הוצא את היחידה המתכלה מהשקית הסטרילית, הוצא את המכסים של המחברים וחבר לצנרת האינפוזיה (לא להדק יותר על המידה)

1



2

שטוף את היחידה המתכלה וצנרת האינפוזיה

- שטוף את היחידה בנוזל עד הוצאת כל האויר מהיחידה (19 מיליליטר נפח)
- ניתן לשטוף בנוזלי עירוי או מוצרי דם
- שקול שימוש בשקית לחץ או משאבה ידנית להגברת קצב העירוי

2



3

חבר את היחידה המתכלה ליחידת הבסיס

- וודא שהחיצים על המחבר של הכבל הם באותו צד של החיצים שעל גבי היחידה המתכלה
- לחץ על כפתור ההפעלה שנמצא מאחור
- המשך לפעול על פי החיוויים שהמכשיר מציג

3

סרוק ברקוד כדי לצפות בסרטון
הדרכה בעברית (כעשר דקות)



תקציר זה אינו תחליף לקריאת חוברת הוראות
המשתמש של המוצר וביצוע אימון משתמש!
סרוק את הברקוד על מנת להירשם לספריית
המוצר ברשת או כתוב לנו ל-info@qinflow.com



ווירור/אקסטרים: הודעות ותפעול תקלות

שים לב: טקסט אדום מחייב פעולה

הודעת "HEATING"

המכשיר מחמם

הודעת "CHANGE IN FLOW"

- המכשיר זיהה שינוי בזרימה. הודעה זו הינה הודעה שכחה, שמתרחשת בעיקר כשמשתמשים במשאבה ידנית או כשהזרימה נמוכה במיוחד
- אין צורך לנקוט בשום פעולה אם יש זרימה
- במידה ואין זרימה, אתר את הסיבה לכך

הודעת "FLUID IS HOT"

- בדרך כלל אין צורך לנקוט בשום פעולה; המערכת תפעל באופן אוטומטי להפחתת החימום
- אם ההודעה לא נעלמת, החלף יחידה מתכלה

טמפרטורת יציאה מתחת לטמפרטורת היעד

- וודא שטמפרטורת הכניסה אינה מעל 30 מעלות צלזיוס
- אם הנזלים מתחת ל-30 מעלות, קצב הזרימה גבוה מיכולות הסוללה. שקול להפחית את הקצב

הודעת "BATTERY LOW"

המשך שימוש עד שהחיווי "BATTERY EMPTY" מוצג. במקרה כזה, החלף סוללה

אין זרימה

ליחידה המתכלה אין יכולת לווסת זרימה. בדוק את תקינות כל הרכיבים משקית העירוי ועד לפצוץ/חולה. שקול שימוש בשקית לחץ או משאבה ידנית על מנת להגביר קצב

הודעת "CONNECT THE DU"

חבר את היחידה המתכלה. החלף יחידה מתכלה אם ההודעה לא נעלמת

הודעת "MALFUNCTION"

- 1 ככה את המכשיר, וודא שהיחידה המתכלה נשטפה ואין אוויר במערכת והפעל שוב את המכשיר
- 2 אם התקלה עדיין לא נפתרה: ככה שוב את המכשיר, החלף את היחידה המתכלה ביחידה חדשה שטופה מאוויר והפעל שוב את המכשיר

הודעת "SYSTEM ERROR"

- 1 ככה והפעל את המכשיר
- 2 אם התקלה עדיין לא נפתרה: ככה שוב את המכשיר, החלף את היחידה המתכלה ביחידה חדשה שטופה מאוויר והפעל שוב את המכשיר

אין תצוגה

החלף סוללה

אל תשתמש במכשיר אם התצוגה תקולה

נזילה מהיחידה המתכלה

החלף יחידה מתכלה

לא מצליח לתפעל את המוצר? רוב הבעיות יפתרו על ידי ווידוא שאין בעיות זרימה בצנרת העירוי/ואו החלפת היחידה המתכלה.

חוברת ההוראות למשתמש יכולה לסייע. במידת הצורך: כתוב לנו ל-info@qinflow.com

או פתח קריאת שירות באתר החברה (Open Support Ticket >> Service & Support >> qinflow.com)