



ЛІНІЙКА ВИРОБІВ WARRIOR | 3 КРОКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

1

ПІДКЛЮЧІТЬ ТРУБКУ ДО БЛОКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БВІ)

- Перевірте, що пакет БВІ не пошкоджений або його термін придатності не минув
- Зніміть кришки Люера
- Підключіть трубку до БВІ (вхід БВІ — це коротка трубка з ПВХ). Не затягуйте занадто сильно
- Дозволено використання зовнішніх пристроїв для інфузії (до 360 мм рт. ст.)



1

2

ЗАПОВНІТЬ ЯК ТРУБКИ, ТАК І БВІ

- Переконайтеся, що все повітря витіснене (об'єм заповнення — 19 мл)
- Можна заповнювати кров'ю або рідиною
- Розгляньте можливість використання пакета для натискання або ручної помпи для швидкого заповнення еритроцитами або цільною кров'ю



2

3

ПІДКЛЮЧІТЬ БВІ ДО БАЗОВОГО БЛОКА Й УВІМКНІТЬ

- Вирівняйте виступаючі стрілки на БВІ та кабельному роз'ємі базового блока (або подовжувачі)
- Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на задній панелі пристрою (не кнопку на передній панелі!)
- Дотримуйтесь системних вказівок на РК-екрані



3

ЛІНІЙКА ВИРОБІВ WARRIOR КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПОВІДОМЛЕНЬ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

(примітка: **ЧЕРВОНИЙ** колір вказує на те, що дія обов'язкова)

ПОВІДОМЛЕННЯ «CONNECT THE DU» (ПІДКЛЮЧИТЬ ПРИСТРІЙ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ)

Підключіть BBI. Замініть BBI, якщо повідомлення не зникає.

ПОВІДОМЛЕННЯ «MALFUNCTION» (НЕСПРАВНІСТЬ)

- 1 Вимкніть пристрій, переконайтеся, що BBI заправлений, а тоді повторно активуйте пристрій.

Якщо проблему не вирішено:

- 2 Замініть BBI на повністю заправлений. Повторно активуйте пристрій.

ПОВІДОМЛЕННЯ «SYSTEM ERROR» (СИСТЕМНА ПОМИЛКА)

- 1 Вимкніть та знову ввімкніть пристрій

Якщо проблему не вирішено:

- 2 Замініть BBI на повністю заправлений. Повторно активуйте пристрій

НЕМАЄ РК-ДИСПЛЕЯ / ЧАСТКОВИЙ РК-ДИСПЛЕЙ

Замініть акумулятор, якщо не працює дисплей

Не використовуйте пристрій, якщо дисплей пошкоджено,
навіть незначно

ВИТІК BBI

Замініть BBI. Зменште зусилля, якщо працюєте з ручними інфузійними помпами. Повідомте про це QinFlow.

Примітка. Цей КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА НЕ містить усіх вказівок, як в інструкції з використання. Тому, будь ласка, зверніться до інструкції з використання для отримання повних вказівок щодо експлуатації вашого пристрою Warrior! Важливо! Перед початком роботи з пристроєм користувачі повинні пройти інструктаж з його експлуатації.

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до всієї відповідної інформації (примітка: під час першого входу в систему може знадобитися авторизація) або зв'яжіться з нами за адресою info@qinflow.com



ПОВІДОМЛЕННЯ «HEATING» (НАГРІВАННЯ)

Наразі система нагріває рідину. Не потрібно виконувати жодних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ «CHANGE IN FLOW» (ЗМІНА ПОТОКУ)

- Виявлено зміну потоку. Це повідомлення відобразатиметься часто, особливо під час використання пристроїв з переривчастим потоком або застосування низьких потоків технічного обслуговування.
- Жодних дій не потрібно, якщо потік видно в камері пристрою для краплинного вливання. В іншому випадку виправте переривання потоку (наприклад, перевірте, чи немає перегинів проводу).

ПОВІДОМЛЕННЯ «FLUID IS HOT» (ГАРЯЧА РІДИНА)

- Як правило, жодних дій не потрібно. Система відновиться автоматично.
- Замініть BBI, якщо повідомлення не зникає.

ТЕМПЕРАТУРА НА ВИХОДІ НИЖЧЕ ВСТАНОВЛЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

- Переконайтеся, що температура рідини, що надходить, нижче 30 градусів за Цельсієм
- Для холодної рідини це вказує на те, що швидкість потоку перевищує можливості нагрівання пристрою. Розгляньте можливість зменшення швидкості потоку.

ПОВІДОМЛЕННЯ «BATTERY LOW» (НИЗЬКИЙ ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА)

Ще зберігається значний об'єм. Продовжуйте використання пристрою. Коли відобразиться повідомлення «Battery Empty» (Заряд акумулятора вичерпано) відкрийте бічні фіксатори й замініть акумулятор.

НЕМАЄ ПОТОКУ

BBI не контролює потік. Отже, він не може зупинити потік. Якщо застосовується тільки гравітаційна подача, може знадобитися 30–60 секунд, щоб заправити BBI еритроцитами або ціліною кров'ю. Тому розгляньте можливість використання пакета для натискання або ручної помпи, щоб прискорити процес.

Не вдається вирішити проблему? Швидко вирішення більшості проблем полягає в тому, щоб виправити ускладнення потоку й замінити BBI. Якщо проблему все ще не вирішено, навіть після перегляду інструкції з використання, напишіть нам на адресу info@qinflow.com або відкрийте запит на підтримку на нашому вебсайті (QinFlow.com >> Services & Support (Послуги та підтримка) >> Open Support Ticket (Відкрити запит на підтримку))