




ЛІНІЙКА ВИРОБІВ WARRIOR LITE | 3 КРОКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

1

ПІДКЛЮЧІТЬ ТРУБКУ ДО БЛОКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БВІ)

- Перевірте, що пакет БВІ не пошкоджений або його термін придатності не минув
- Зніміть кришки Люера
- Підключіть трубку до БВІ (вхід БВІ — це коротка трубка з ПВХ). Не затягуйте занадто сильно
- Дозволено використання зовнішніх пристроїв для інфузії (до 360 мм рт. ст.)

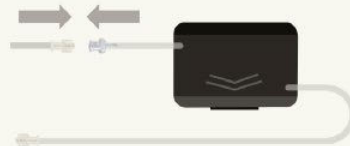

1

2

ЗАПОВНІТЬ ЯК ТРУБКИ, ТАК І БВІ

- Переконайтеся, що все повітря витіснено (об'єм заповнення — 19 мл)
- Можна заповнювати кров'ю або рідиною
- Розгляньте можливість використання пакета для натискання або ручної помпи для швидкого заповнення еритроцитами або цілісною кров'ю



2

3

ПІДКЛЮЧІТЬ БВІ ДО БАЗОВОГО БЛОКА (або до подовжувача)

- Виступаючі стрілки БВІ повинні бути обернені до світлодіодної панелі
- Під час використання подовжувача вирівняйте виступаючі стрілки на БВІ та роз'ємі (тактильний напрямки).
- Система увімкнеться автоматично (або натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, розташовану на світлодіодній панелі)
- Дотримуйтесь системних вказівок на світлодіодній панелі



3

Примітка. Цей КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА НЕ містить усіх вказівок, як в інструкції з використання. Тому, будь ласка, зверніться до інструкції з використання для отримання повних вказівок щодо експлуатації вашого пристрою Warrior! Важливо! Перед початком роботи з пристроєм користувачі повинні пройти інструктаж з його експлуатації!

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до всієї відповідної інформації (примітка: під час першого входу в систему може знадобитися авторизація) або зв'яжіться з нами за адресою info@qinflow.com



WARRIOR LITE

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПОВІДОМЛЕНЬ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

(примітка: **ЧЕРВОНИЙ** колір вказує на те, що дія обов'язкова)



Нагрівання до встановленої температури.
Переконайтеся, що існує потік



Досягнуто заданої температури



Швидкість потоку перевищує ємність акумулятора.
Розгляньте можливість зменшення швидкості потоку



Низький заряд акумулятора. Акумулятор Extra Power все ще має значний об'єм. Продовжуйте використання пристрою.

Змініть акумулятор, коли його заряд критично низький (всі смуги блимають)

Немає потоку

БВІ не контролює потік. Отже, він не може зупинити потік. Якщо застосовується тільки гравітаційна подача, може знадобитися 30–60 секунд, щоб заправити БВІ еритроцитами або цільною кров'ю. Розгляньте можливість використання напірної або ручної помпи, щоб прискорити процес.

Витік

Змініть БВІ. Зменште зусилля, якщо працюєте з ручними інфузіонними пристроями. Повідомте QinFlow.



Потрібне усунення несправностей

1

Вимкніть пристрій (тривале натискання кнопки ввімкнення/вимкнення), зафіксуйте потік ускладнень, переконайтеся, що БВІ підготовлений, і повторно активуйте (натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення).

Якщо проблему не вирішено:

2

Вимкніть пристрій і замініть БВІ повністю направленим пристроєм. Блок має запускатися автоматично після підключення БВІ. Якщо ні — натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

Немає відображення

1

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення

Якщо проблему не вирішено:

2

Змініть акумулятор

Якщо проблему не вирішено:

3

Замініти БВІ



Не використовуйте пристрій, якщо дисплей пошкоджено

Не вдається вирішити проблему? Швидке вирішення більшості проблем полягає в тому, щоб виправити ускладнення потоку й замінити БВІ. Якщо проблему все ще не вирішено, навіть після перегляду інструкції з використання, напишіть нам на адресу info@qinflow.com або відкрийте запит на підтримку на нашому вебсайті (QinFlow.com >> Services & Support (Послуги та підтримка) >> Open Support Ticket (Відкрити запит на підтримку))